

ImproMask Plus návod

1. Vyjměte textilní masku (roušku) ze sáčku a připravte ji tak, aby část pro nos byla nahoře.
2. Nasadte masku na pusu a nos a pomocí postranních tkanic zahákněte za uši.
3. Nosní klip upravte dle Vašeho nosu tak, aby maska těsně doléhala k obličejí a zakrývala celý nos a ústa.

Výměna filtru:

1. Vyjměte filtr ze sáčku s náhradními filtry
2. Rozevřete tento filtr do podoby k vložení do textilní masky.
3. Odstraňte již použitý filtr
4. Vložte na stejné místo filtr nový a připevněte po stranách pomocí lepících pásek, které jsou součástí filtru.

Každý filtr je výrobcem určený na 3 dny.

Správné nasazení masky:

Před prvním použitím je nutná důkladná hygiena rukou pomocí mýdla a teplé vody. Po umytí rukou přiložte vrchní část respirátoru k obličejí a následně přitlačte na obličej jeho spodní část. Když respirátor dokonale přilne k vaší tváři, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržovali v bezpečné poloze. Správně nasazená ochranná maska musí těsně doléhat k obličejí a má zakrývat ústa, nos i bradu. Muži by měli být oholení, protože brada může způsobit netěsnosti. Při snímání masky se dotýkejte pouze popruhů, ne části, která filtruje vzduch.